

Instrukcja przygotowania **2,5% stężenia roztworu roboczego** z koncentratu VIRUSOLVE+ EDS do narzędzi i endoskopów

1

Do wanienki (lub myjki ultradźwiękowej) na roztwór roboczy należy odpowiednio odmierzoną ilość wody:


- w przypadku wanienki 500 ml (0,5 L) nalej 487,5 ml (0,4875 L) wody
- w przypadku wanienki 3 000 ml (3 L) nalej 2 925 ml (2,925 L) wody
- w przypadku wanienki 5 000 ml (5 L) nalej 4 875 ml (4,875 L) wody



2

W celu uzyskania **2,5% stężenia roztworu roboczego**, odmierzoną ilość koncentratu Virusolve+ EDS wlej do wcześniej odmierzonej ilości wody:

- w przypadku wanienki 500 ml (0,5 L) wlej 12,5 ml koncentratu
- w przypadku wanienki 3 000 ml (3 L) wlej 75 ml koncentratu
- w przypadku wanienki 5 000 ml (5 L) wlej 125 ml koncentratu

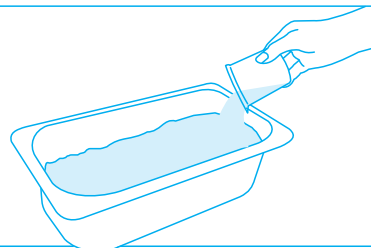

3


Wymieszaj roztwór.

Przygotowany roztwór jest gotowy do użycia.

Roztwór VIRUSOLVE+ EDS wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia.

Aktywność musi być kontrolowana paskami testowymi QuantofixQuat.

Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni.

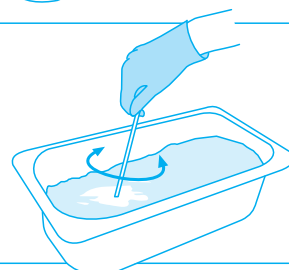

4


Włóż narzędzia do wanienki. Upewnij się, że narzędzia zostały całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem. Odczekaj zalecany czas kontaktu 5 min*

5 min



Uwaga: Upewnij się, że wszystkie przestrzenie i wgłębienia są całkowicie zanurzone w preparacie i nie powstały pęcherzyki powietrza


*W przypadku, gdy twardość wody przekracza 300 ppm, zalecany czas kontaktu to 10 min.

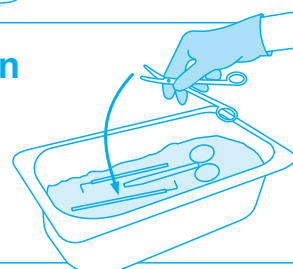

5

Zdezynfekowane narzędzia wyjmij z roztworu i dokładnie opłucz wodą.

Następnie osusz sterylnym materiałem i poddaj dalszym procesom higienicznym – jeśli wymagane.

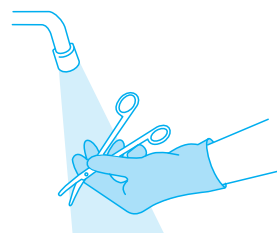

Roztwór 2,5%	Objętość roztworu
12,5 ml konc. + 487,5 ml wody	0,5 litra
25,0 ml konc. + 975 ml wody	1,0 litr
50,0 ml konc. + 1,95 l wody	2,0 litry
75,0 ml konc. + 2,925 l wody	3,0 litry
100,0 ml konc. + 3,9 l wody	4,0 litry
125,0 ml konc. + 4,875 l wody	5,0 litrów
250,0 ml konc. + 9,750 l wody	10,0 litrów

MCPOLSKA.PL

Lider w szybkiej dezynfekcji sporobójczej

Zakażenia pod kontrolą

zadzwoń lub napisz

tel. 61 822 65 61

biuro@mcpolska.pl