

Instrukcja przygotowania **5% stężenia roztworu roboczego VIRUZYME PCD** do mycia i dezynfekcji instrumentów i wyposażenia w procesach manualnych i myjkach ultradźwiękowych

1

Do wanny na roztwór roboczy (lub myjki ultradźwiękowej) należy odpowiednio odmierzoną ilość wody:

- w przypadku wanny 5 000 ml (5 L) należy 4 975 ml (4,975 L) wody
- w przypadku wanny 10 000 ml (10 L) należy 9 950 ml (9,950 L) wody
- w przypadku wanny 20 000 ml (20 L) należy 19 900 ml (19,900 L) wody




20°C - 40°C

2

W celu uzyskania **0,5% stężenia roztworu roboczego**, odmierzoną ilość koncentratu Viruzyme PCD wlej do wcześniej odmierzonej ilości wody:


- w przypadku wanny 5 000 ml (5 L) wlej 25 ml koncentratu
- w przypadku wanny 10 000 ml (10 L) wlej 50 ml koncentratu
- w przypadku wanny 20 000 ml (20 L) wlej 100 ml koncentratu

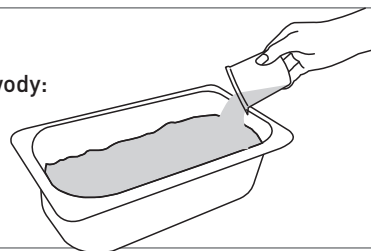

3

Wymieszaj roztwór.

Przygotowany roztwór jest gotowy do użycia.

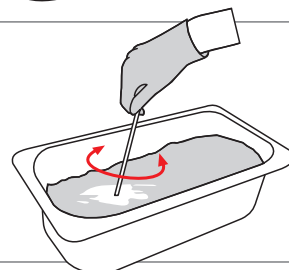

4


Włóż narzędzia do wanny.

Upewnij się, że narzędzia zostały całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem.

Temperatura roztworu 20-40°C.

Odczekaj zalecany czas kontaktu 5 minut w wannach dezynfekcyjnych (3 minuty w myjkach ultradźwiękowych). Dokładnie umyj wszystkie narzędzia.


 **5 min**
20°C - 40°C

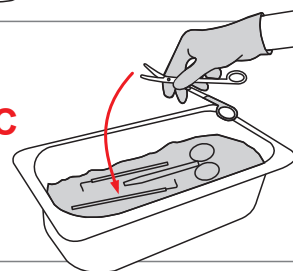

5

Zdezynfekowane przedmioty wyjmij z roztworu i dokładnie opłucz czystą wodą.

Następnie przenieś do kolejnego etapu dekontaminacji.

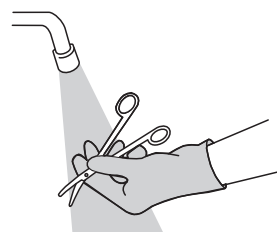

Roztwór 0,5%	Objętość roztworu
25,0 ml konc. + 4,975 ml wody	5,0 litrów
50,0 ml konc. + 9,95 l wody	10,0 litrów
75,0 ml konc. + 14,925 l wody	15,0 litrów
100,0 ml konc. + 19,9 l wody	20,0 litrów

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz z ulotką informacyjną

MCPOLSKA.PL

Lider dezynfekcji sporobójczej i sterylizacji plazmowej
Zakażenia pod kontrolą

www.bezpieczny-szpital.pl

zadzwoń lub napisz

tel. 61 822 65 61
biuro@mcpolska.pl