

Zasady prawidłowego stosowania preparatów do manualnej i automatycznej dezynfekcji endoskopów

- Przed pierwszym zastosowaniem roztworów przygotowywanych z koncentratów umyć dokładnie wanienki, pojemniki, miarki po poprzednich preparatach (eliminuje to możliwość zajścia reakcji chemicznej).

- Przed pierwszym użyciem lub zmianą preparatów z aldehydowego lub na bazie aktywnego tlenu lub kwasu nadoctowego na Virusolve+ EDS i Virusolve+ EDS AUTO należy endoskopy i akcesoria stosowane w endoskopii dokładnie wymyć, a następnie zamoczyć na min. 12 godzin w 1% roztworze Viruzyme III.

- Stosować prawidłowe stężenia i czas działania środka:

Procesy manualne

Viruzyme III:

użyj 0,5% roztworu roboczego i zapewnij czas moczenia 10 minut

Virusolve+ EDS Koncentrat:

użyj 2,5% roztworu roboczego i zapewnij kontaktu 5 minut*, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu dezynfekcji B, F, Tbc, V, S

Procesy automatyczne

Virusolve+ EDS AUTO Koncentrat:

użyj 2,5% roztworu roboczego i zapewnij kontaktu 5 minut*, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu dezynfekcji B, F, Tbc, V, S

Viruzyme:

użyj 0,2 - 0,5% roztworu roboczego i zapewnij czas moczenia 10 minut

- Nie przekraczać temperatury pracy produktów zgodnie z instrukcją na etykiecie lub ulotką informacyjną produktu.

- Nie mieszać ze sobą preparatów, które nie są kompatybilne (np. preparaty różnych producentów). Nie stosować ich zamiennie ponieważ łączenie z innymi bazami aktywnymi jak: aktywny tlen, kwas nadoctowy, aldehydy może powodować reakcje chemiczne, a co za tym idzie uszkadzać endoskopy i akcesoria.

- Po procesie mycia i dezynfekcji endoskopy optukać w wodzie sterylnej / dejonizowanej i wysuszyć, a następnie przechowywać zgodnie z wytycznymi.

- Zapoznać się dokładnie z instrukcjami stosowania, kartami charakterystyki i ulotkami produktów.

- Magazynować w warunkach opisanych w karcie charakterystyki preparatów.

*W przypadku, gdy twardość wody przekracza 300 ppm, zalecany czas dezynfekcji to 10 min.

MCPOLSKA.PL

Lider w szybkiej dezynfekcji sporobójczej

Zakażenia pod kontrolą

zadzwoń lub napisz

tel. 61 822 65 61
biuro@mcpolska.pl