

Instrukcja przygotowania **5% stężenia roztworu** roboczego z koncentratu **VIRUSOLVE+** do mycia i dezynfekcji sporobójczej wysokiego poziomu narzędzi

1

Do wanienki (lub myjki ultradźwiękowej) na roztwór roboczy nalej odpowiednio odmierzoną ilość wody:


- w przypadku wanienki 500 ml (0,5 L) nalej 475 ml (0,475 L) wody
- w przypadku wanienki 3 000 ml (3 L) nalej 2 850 ml (2,85 L) wody
- w przypadku wanienki 5 000 ml (5 L) nalej 4 750 ml (4,75 L) wody



2

W celu uzyskania **5% stężenia roztworu roboczego**, odmierzoną ilość koncentratu Virusolve+ wlej do wcześniej odmierzonej ilości wody:

- w przypadku wanienki 500 ml (0,5 L) wlej 25 ml koncentratu
- w przypadku wanienki 3 000 ml (3 L) wlej 150 ml koncentratu
- w przypadku wanienki 5 000 ml (5 L) wlej 250 ml koncentratu

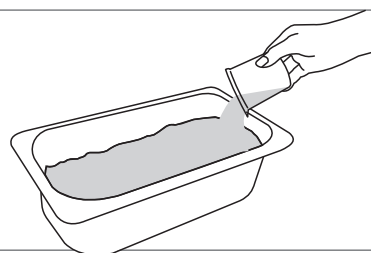


3

Wymieszaj roztwór.

Przygotowany roztwór jest gotowy do użycia.

Roztwór Virusolve+ wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność musi być kontrolowana paskami testowymi QuantofixQuat lub VIRUTEST Koncentrat. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni.

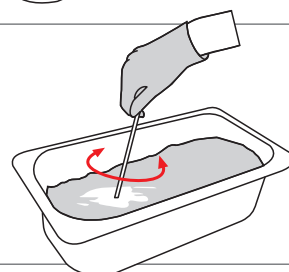


4

Włóż narzędzia do wanienki.

Upewnij się, że narzędzia zostały całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem. Odczekaj zalecany czas kontaktu 5 min*

* W przypadku, gdy twardość wody przekracza 300 ppm, zalecany czas dezynfekcji narzędzi to 10 min


5 min

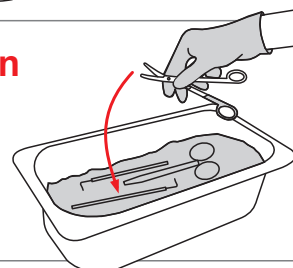

5

Zdezynfekowane narzędzia wyjmij z roztworu i dokładnie opłucz sterylną wodą.

Następnie osusz sterylnym materiałem i poddaj dalszym procesom higienicznym – jeśli wymagane.

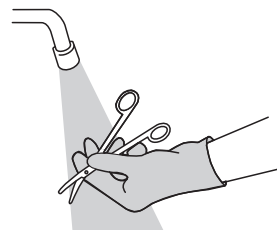

Roztwór 2,5%	Objętość roztworu	Roztwór 5,0%
12,5 ml konc. + 487,5 ml wody	0,5 litra	25,0 ml konc. + 475 ml wody
25,0 ml konc. + 975 ml wody	1,0 litr	50,0 ml konc. + 0,95 l wody
50,0 ml konc. + 1,95 l wody	2,0 litry	100,0 ml konc. + 1,9 l wody
75,0 ml konc. + 2,925 l wody	3,0 litry	150,0 ml konc. + 2,85 l wody
100,0 ml konc. + 3,9 l wody	4,0 litry	200,0 ml konc. + 3,8 l wody
125,0 ml konc. + 4,875 l wody	5,0 litrów	250,0 ml konc. + 4,75 l wody
250,0 ml konc. + 9,750 l wody	10,0 litrów	500,0 ml konc. + 9,5 l wody

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz z ulotką informacyjną